

nenno[®]
Leite

CZ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vážený zákazník,
děkujeme, že jste si zakoupili **Neno Leite**, silikonový sběrač mléka pro sběr mléka během krmení/odsávání z druhého prsu. Klade si za cíl sbírat potravu jednoduchým a efektivním způsobem.

01. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Před každým použitím zkontrolujte stav výrobku.
2. K čištění doporučujeme používat pouze měkké kartáče nebo houbičky, tvrdé materiály mohou poškrábat.
3. Pokud jeví jakékoli známky poškození, vyměňte produkt.
4. Neskladujte v blízkosti ostrých předmětů.
5. Tento výrobek není hračka. Kolektor by měl být používán v souladu s jeho zamýšleným použitím.
6. Výrobek skladujte v suchu a nevystavujte přímému slunečnímu záření

02. VLASTNOSTI PRODUKTU

Snadné použití
Jediným stisknutím nasává sběrač mléka vaše mléko silou nepřetržitěho sání – žádný hluk, žádná elektřina a žádné kabely. Čerpejte kdekoli a kdykoli!

Snadno se čistí
Design vše v jednom a není nutná demontáž. Velmi snadno se čistí čistou vroucí vodou po dobu asi 2 minut.

Materiál BPA FREE
Vyrobeno z vysoce kvalitního silikonu. Bez BPA, PCV a ftalátů.

Bezbolestné a tiché
Sběrač mléka pomáhá odsát mateřské mléko diskretně, tiše a rychle. Vyhněte se ostudě na veřejných místech.

Už žádný únik
Když většina matek kojí, prsa na druhé straně často vylije mateřské mléko, které může namočit vaše oblečení nebo vaše dítě, nebo se může plýtvat na jednorázové kojící podložce. Sběrač mléka dokáže zachytit každou kapku mateřského mléka, když kojíte.

03. JAK POUŽÍVAT

1. Ujistěte se, že sběrač mléka byl před a po použití vyčištěn.
2. Stiskněte pumpu, abyste vytlačili vnitřní vzduch.
3. Obratěte přírubu a umístěte ji na bradavku uprostřed uprostřed prsního štítu.
4. Obnovte přírubu, pumpa by pak pevně přisála k vašemu prsu.
5. Produkt můžete používat jako sběrač. Mléko pak bude volně proudit k pumpě. Pokud ji chcete používat jako manuální odsávačku mateřského mléka – zmáčkněte odsávačku, abyste usnadnili únik mléka.



04. SPECIFIKACE

Materiál: silikon + PP
Kapacita: 100 ml

05. ZÁRUČNÍ LIST

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců.
Záruční podmínky naleznete na: <https://nenno.pl/gwarancja>

Podrobnosti, kontakt a webovou adresu naleznete na:
<https://nenno.pl/kontakt>

*Specifikace a obsah sady se mohou bez upozornění změnit.
Omlouváme se za případné nepřijemnosti.*

nenno[®]

www.nenno.pl
inspired by Children,
designed by Parents

Vyrobeno v P.R.C.

nenno[®]
Leite

SK

NÁVOD NA OBSLUHU

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si zakúpili **Neno Leite**, silikónový zberač mlieka na zber mlieka počas kŕmenia/odsávania z druhého prsníka. Jeho cieľom je zbierať potraviny jednoduchým a efektívnym spôsobom.

01. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku.
2. Na čistenie odporúčame používať iba mäkké kefy alebo špongie, tvrdé materiály môžu poškrábať.
3. Ak sa objavia akékoľvek známky poškodenia, vymeňte produkt.
4. Neskladujte v blízkosti ostrých predmetov.
5. Tento výrobok nie je hračka. Kolektor by sa mal používať v súlade s účelom použitia.
6. Výrobok skladujte na suchom mieste a chráňte pred priamym slnečným žiarením

02. VLASTNOSTI PRODUKTU

Jednoduché použitie
Jediným stlačením zberač mlieka odsaje vaše mléko silou nepřetržitěho sání – bez hluku, elektřiny a káblov. Čerpajte kdekoliev a kedykoliev!

Jednoduché čistenie
Dizajn všetko v jednom a nie je potrebná žiadna demontáž. Veľmi ľahko sa čistia čistou vriacou vodou asi 2 minúty.

Materiál BPA FREE
Vyrobené z vysoko kvalitného silikónu. Bez BPA, PCV a ftalátov.

Bezbolestné a tiché
Zberač mlieka pomáha diskretné, ticho a rýchlo odsáť materské mlieko. Vyhnite sa hanbe na verejných miestach.

Už žiadny únik
Keď väčšina matiek dojčí, prsník na druhej strane často vyleje materské mlieko, ktoré môže namočiť vaše oblečenie alebo dieťa, alebo sa môže hodiť na jednorázovú podložku na dojčenie. Zberač mlieka dokáže pozbierať každú kvapku materského mlieka počas dojčenia.

03. AKO POUŽÍVAŤ

1. Uistite sa, že zberač mlieka bol vyčistený pred a po použití.
2. Stlačte pumpu, aby ste vytlačili vnútorný vzduch.
3. Prevráťte obrubu, umiestnite ju na bradavku v strede v strede chrániča prsníka.
4. Obnovte prírubu, potom sa pumpa pevne prisaje k vášmu prsníku.
5. Produkt môžete použiť ako zberač. Mlieko potom bude volne prúdiť k pumpke. Ak ju chcete použiť ako manuálnu odsávačku mlieka – stlačte odsávačku, aby ste uľahčili únik mlieka.



04. ŠPECIFIKÁCIA

Materiál: silikón + PP
Kapacita: 100 ml

05. ZÁRUČNÝ LIST

Na výrobok sa vztahuje záruka 24 mesiacov.
Záručné podmienky nájdete na: <https://nenno.pl/gwarancja>

Podrobnosti, kontakt a webovú adresu nájdete na:
<https://nenno.pl/kontakt>

*Špecifikácie a obsah súpravy sa môžu zmeniť bez upozornenia.
Ospravedľujeme sa za prípadné nepřijemnosti.*

nenno[®]

www.nenno.pl
inspired by Children,
designed by Parents

Vyrobené v P.R.C.

Výrobca:
KGK TRADE sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5B,
31-752 Krakov,
Poľsko